

1. L'ERGOFIX

L'Ergofix est un support d'avant-bras à fixer sur l'accoudoir d'un fauteuil ou d'une chaise de bureau. Il a été conçu pour les personnes avec un bras inerte ou à mobilité réduite et permet de maintenir le bras sans effort et en limitant le risque d'escarres.



Désignation produit	Ergofix
Gamme	Solutions thérapeutiques
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garantie constructeur 2 ans. Poches de fluide garanties 5 ans

2. MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	H	L	Ép.	Poids
2011	12 cm	28 cm	2 cm	0,950 kg
2022	sur mesures			

Composition

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque d'asphyxie La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu. Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.

Insert	• Mousse HR 40 • Mousse HR 60 (parois) • Poche de Fluide HV
Housse	• 3D sur le dessus • Indéchirable sur les côtés • Anti-dérapant sur le dessous
Fixation	Sangles réglables

4. POSITIONNER ET UTILISER L'ERGOFIX

1. Positionnez l'Ergofix sur l'accoudoir de manière à ce que le poignet repose sur l'extrémité arrondie.
2. Fixez l'Ergofix sur l'accoudoir du fauteuil à l'aide des sangles.

5. OPTIONS À CONFIGURER

Élément	Référence	Désignation
Coloris ¹	NR	Coloris noir
	BM	Coloris bleu marine
	BR	Coloris bleu roi
	BX	Coloris bordeaux
	KK	Coloris kaki
	RG	Coloris rouge

6. ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Ergofix dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

En cas de besoin, lavez l'Ergofix à la main avec de l'eau et du savon.

La housse de votre Ergofix est déhoussable et peut être lavée en machine à 30° ou à la main. Si votre Ergofix s'imbibe de liquide, déhousssez-le et laissez sécher la mousse à l'air libre pendant 24h.

1. Seul le 3D est disponible dans ces coloris. Les parties en Anti-dérapant et Indéchirable restent noires.

7. NOUS CONTACTER

Ergotech

9 route de la Madeleine, 56450 Theix-Noyal

Mail : adv@ergotech.fr

Tél : +33 (0)2 97 66 04 56

<https://www.ergotech.fr/>

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00039